

TESTVERFAHREN

TEST PROCEDURE



Die Versiegelung abziehen und das Röhrchen in das Loch der Box einsetzen.

Peel off the foil film on the extraction tube and insert into the hole




Führen Sie den Nasentupfer in die richtige Tiefe ein und rollen Sie jedes Nasenloch 5-mal

insert nasal swab to an appropriate depth, roll 5 times in each nostril



Drehen Sie das Wattestabchen 8-10 Mal.

Rotate the swab 8-10 times

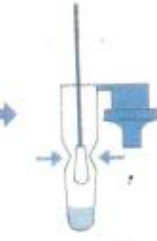

Drücken Sie auf den Tupfer und geben Sie so viel Flüssigkeit wie möglich ab.

Press the swab and release as much liquid as possible



Platzieren die Kappe.

Place the cap



3 Tropfen in die Probenvertiefung geben

Add 3 drops to sample well(S)



Ergebnis ablesen

Read the result

Interpretation des Testergebnisses
Result interpretation

Positiv <i>Positive</i>	Negativ <i>Negative</i>	Ungültig <i>Invalid</i>

Hinweis: Das abgebildete Testverfahren dient nur als Referenz. Für die detaillierte Benutzung lesen Sie bitte die Packungsbeilage.
Remark: illustration is for reference only, further details provided on package insert

Achtung: Nach 10-15 Minuten ablesen, danach ist das Testergebnis nicht mehr aussagekräftig.